

Ohjeet potilaalle

Seuraavat ohjeet on annettava potilaalle, joille implantoidaan Barostim-järjestelmä.

HAAVAN HOITO LEIKKAUKSEN JÄLKEEN

- Haavaside on jätettävä paikalleen kunnes lääkäri toisin neuvoo
- Varo painamasta haavaa tai laitetta kylvyssä
- ÄLÄ kosketa leikkauskohtia
- ÄLÄ makaa IPG-laitteen (rintakehään implantoidun laitteen) päällä tai työnnä sitä
- ÄLÄ manipuloi IPG-laitetta tai elektrodiä (kaulaan implantoitua laitetta) ihon läpi, koska se voi vahingoittaa laitetta tai laitetta ympäröivää kudosta tai saada elektrodin irtamaan IPG-laitteesta
- Kuume, punoitus, erite tai kova kipu leikkauskohdassa 3 päivän jälkeen voi olla infektion merkki
 - Jos sinulla on mitään edellä mainituista oireista, ÄLÄ yritä hoitaa niitä kotona, vaan ota lääkäriin yhteyttä mahdollisimman pian
 - Varhain havaitut infektiot voidaan yleensä hoitaa antibiooteilla
 - Vakavammat infektiot voivat edellyttää IPG-laitteen ja/tai elektrodin poistoa

YLEISIÄ TIETOJA

- Jatka lääkkeiden käyttöä, ruokavaliota, liikuntaa ja elämäntyylin muutoksia ohjeiden mukaan
- Pidä mukanasasi potilaan tunnistekorttia ja näytä se turvatarkastuksissa
- IPG-laitteen paristo tyhjenee ajan mittaan ja se on vaihdettava
- Sinun pitää käydä lääkärin vastaanotolla järjestelmän oikean toiminnan ja hoitovasteen varmistamiseksi
- Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos:
 - tunnet stimulaatiota (pistelyä, nykimistä, puhuminen tai nieleminen on vaikeaa)
 - tunnet huimausta, rintaan koskee, sinulla on hengitysvaikeuksia tai jalat turpoavat
 - verenpaine tai syke ovat epätavallisen alhaisia.

VAROITUKSET/VAROTOIMET

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ollaan tekemässä hoitotoimenpidettä:
 - tietyt toimenpiteet, kuten magneettikuvaus, sähkökauterisaatio, sädehoito, litotripsiatoimenpiteet ja ulkoinen rytminsiirto voivat vaurioittaa IPG-laitetta.
- Jotta hoidon tilapäinen pysähtyminen vältetään, pysyttele vähintään 15 cm:n (6 tuuman) päässä laitteista, joissa on voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä. Näitä ovat mm. seuraavat:
 - voimakkaat magneetit
 - kaiuttimien magneetit
 - sähköinen tuotesuojajärjestelmä (EAS) (varkaudenestolaitteet)
 - sähköhitsauskoneet
 - induktiouunit.
- Kysy lääkäriltä ohjeita ennen kuin menet tiloihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti IPG-laitteen toimintaan. Näitä ovat mm. tilat, joissa on tahdistinpotilaille annettuja varoituksia.
- ÄLÄ manipuloi IPG-laitetta ihon läpi – se voi vahingoittaa elektrodiä tai irrottaa sen pulssigeneraattorista.
- ÄLÄ manipuloi karotispoukaman elektrodiä ihon läpi – tämä voi vaurioittaa elektrodiä tai saada sen irtamaan IPG-laitteesta ja/tai mahdollisesti vaurioittaa karotispoukamaa.



Täydet käyttöohjeet ja tämän asiakirjan tietojen ajantasainen kopio on saatavilla verkkosivustolla:

www.cvr.com/ifu

CVRx, Inc.
9201 West Broadway Avenue, Suite 650
Minneapolis, MN 55445 USA
Phone: (763) 416-2840
Fax: (763) 416-2841
www.cvr.com

CE 2014
0050

EC REP Emergo Europe