

Instructions destinées au patient

Les informations suivantes doivent être fournies aux patients chez lesquels le système Barostim est implanté.


SOINS POSTOPERATOIRES DE LA PLAIE

- Le pansement doit rester sur la plaie pendant la durée indiquée par le médecin.
- Il convient d'être prudent lors de la toilette pour éviter toute pression sur la plaie ou le dispositif.
- NE PAS toucher les sites opératoires.
- NE PAS s'appuyer ou faire pression sur le Gil (dispositif implanté dans la poitrine).
- NE PAS manipuler le Gil ou la sonde (dispositif implanté dans le cou) à travers la peau, car cela peut endommager le dispositif et les tissus environnants ou débrancher la sonde du Gil.
- Une fièvre, des rougeurs, un suintement ou une douleur intense au niveau des sites opératoires au bout de 3 jours peuvent être un signe d'infection.
 - En cas d'apparition des symptômes ci-dessus, NE PAS tenter de se soigner à la maison, contacter le médecin dans les plus brefs délais.
 - Les infections prises en charge rapidement peuvent en général être traitées par antibiotiques.
 - Les infections plus sévères peuvent nécessiter le retrait du Gil et/ou de la sonde.

INFORMATIONS GENERALES

- Poursuivre la prise des médicaments, le régime alimentaire, l'activité physique et les changements du mode de vie comme prescrit.
- Porter la carte d'identification patient et la présenter lors des contrôles de sécurité.
- La pile du Gil s'épuise au fil du temps et devra être remplacée.
- Se présenter aux visites médicales nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du système et une réponse adéquate au traitement.
- Contacter le médecin immédiatement en cas de :
 - stimulation (fourmillements, tressautements, difficulté pour parler ou avaler) ;
 - étourdissements, douleur à la poitrine, difficultés respiratoires, gonflement des jambes ;
 - PA ou fréquence cardiaque inhabituellement basse.

AVERTISSEMENTS/PRECAUTIONS

- Contacter le médecin avant toute procédure médicale prévue :
 - Des procédures telles qu'IRM, intervention par bistouri électrique, radiothérapie, lithotripsie et défibrillation externe peuvent endommager le Gil.
- Pour éviter d'arrêter temporairement le traitement, rester à 15 cm (6 po) au moins des dispositifs ayant des champs électriques ou magnétiques importants tels que :
 - aimants puissants ;
 - aimants de haut-parleur ;
 - système de surveillance électronique d'articles (SEA) (détecteurs antivol) ;
 - machines de soudage à l'arc ;
 - fours à induction.
- Contacter le médecin pour des conseils avant d'entrer dans des environnements qui pourraient avoir un impact négatif sur le fonctionnement du Gil, y compris les zones où des avertissements sont affichés pour empêcher l'entrée des patients porteurs d'un stimulateur cardiaque. 
- NE PAS manipuler le Gil à travers la peau, car cela peut endommager la sonde ou la débrancher du générateur d'impulsions.
- NE PAS manipuler la sonde du sinus carotidien à travers la peau, car cela peut endommager la sonde ou la débrancher du Gil et/ou cela peut léser le sinus carotidien.

Le mode d'emploi complet et un exemplaire à jour des informations fournies dans ce document sont disponibles sur le site www.cvr.com/ifu.